


INSTRUCCIONES DE USO:

1) Verifique que se encuentren todos los componentes que incluye el Kit:

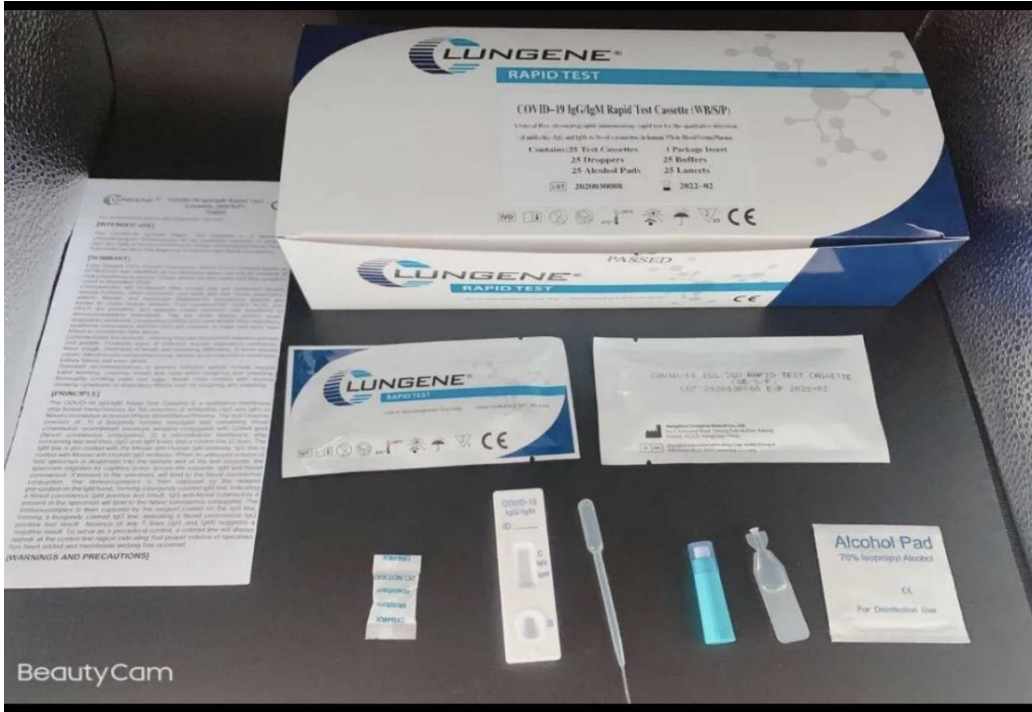

Antes de usar el test, lea atentamente las instrucciones de uso del fabricante en instructivo que acompaña el producto.

Revise el video del fabricante:

<https://drive.google.com/open?id=19YjteULLMflc2o4et1DQuGTep40oOzOA>

- 2) Retire el casete de prueba de la bolsa sellada.
- 3) Limpie su dedo con Alcohol Pad que incluye el kit
- 4) Pinche con la lanceta (aguja) el dedo desde donde se va a extraer la muestra de sangre y la recoge con el cuentagotas.
- 5) Sostenga el cuentagotas verticalmente y transfiera 1 gota de sangre al dispositivo de prueba. Luego agregue 2 gotas del agente diluyente e inicie el tiempo. Interprete los resultados en 15 minutos
- 6) Espere que Aparezcan las líneas de colores en el casete.
- 7) **No lea los resultados después de 20 minutos.**

POSITIVO:



NEGATIVO:



INVALIDO:



En caso de dudas en el uso del test, llamar al siguiente Teléfono:

Sra. TM Paulina Reyes , Fono: 9 32414979